

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20200302

発行日： 2020

年 3 月 2 日

販売名 / サービススマニアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500231
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2020 年 2 月 29 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 2.0 Hr
顧客名	公立邑智病院 様	TEL : 0855-95-2111
所在地	島根県邑智郡邑南町中野3848-2	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2019 年 3 月 8 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 1 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

ランプ切れ異常 (E212) 対応 及び 保守点検

不具合原因、作業内容

濃度計 UVランプの点灯不良が原因で、これを交換しました。
あわせて保守点検を実施しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッテリ数 1054
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒ 3-スネ
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

フタパッキンが剥がれており、テープで貼ってあります。

装置 情報	交換後運転回数： 1241	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 434/431	殺菌/消毒+7#： 807/762
	リークチェック： 812	自己洗浄： 192	7#コル単独： 4	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1
交換後 No. 51811001		
オゾンセンサー	☒	1
No 161118-003		
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒ 1
排水栓	☒ 1
接続コネクタ；水槽側	☐
接続コネクタ；チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒ 3
エアフィルター	☐
水フィルター	☒ 1
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

休診日作業のため、署名なし

ご署名

印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者 作業者



中澤