

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300623
作業年月日	令和2年3月12日		作業時間: 1.2 Hr
顧客名	山本内科医院 様		TEL: 0857-22-2790
所在地	鳥取県倉吉市宮川町2丁目76番地		ご担当 院長先生 村
販売店	鳥取医療器 (株)		ご担当 玉木 哲 様
納入年月日	平成 27年8月6日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 250
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 201	更新 (リセット) 実施 ☒ ・ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 590	殺菌/消毒+7L: 20
	リークチェック: 2	自己洗浄: 257	7Lアルコール単独:	エア単独: 17

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ; 水槽側		☒	/
ワゴン水濃度計		☒	/	接続コネクタ; チューブ側		☒	/
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄	2020年3月12日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	倉吉市宮川町2丁目76番地
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	山本内科医院
ご署名	山本 栄 (印)

修理業者	新鋭工業 株式会社 山陰支店	責任技術者	赤井
	鳥取県米子市皆生温泉2-20-27		
	TEL: 0859-34-5675		