

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190901

発行日：令和 元年 9月 1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>	製造番号： 100264
作業年月日	令和 元年 8月 30日	作業時間： Hr
顧客名	しらいし内科クリニック 様	TEL： 0859-27-0149
所在地	鳥取県西伯郡日吉津村富吉1139-1	ご担当 様
販売店	2011	ご担当 様
納入年月日	### 年 6月 29日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・オゾン水濃度計が原因で「光量低下異常」発生</li> <li>・タッチパネルの画面がフリーズする</li> </ul>	
不具合原因、作業内容	
修理を含めてオーバーホールを実施いたしました。	
点検項目	
フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 559
オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
交換部品は別紙「OED-1000 機番：100264号 工事写真」をご参照ください	

装置情報	交換後運転回数：144→5 更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 13	殺菌/消毒+アル： 1507
	リークチェック： 113	自己洗浄： 70	アルコール単独： 0
			エア単独： 4

交換部品名称	見積部品No	交換	数量	交換部品名称	見積部品No	交換	数量
定期交換部品	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1式	配管パッキン、フタパッキン	7	<input checked="" type="checkbox"/>	1式
コントロール基板	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1枚	メインポンプ	8	<input checked="" type="checkbox"/>	1台
タッチパネル	3	<input checked="" type="checkbox"/>	1台	酸素電磁弁	9	<input checked="" type="checkbox"/>	1個
排水ポンプ	4	<input checked="" type="checkbox"/>	1台	給水電磁弁	10	<input checked="" type="checkbox"/>	2個
ドレパルプ ASSY	5	<input checked="" type="checkbox"/>	1台	アルコールライン電磁弁	11	<input checked="" type="checkbox"/>	1個
マニホールド電磁弁	6	<input checked="" type="checkbox"/>	1式			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄		工場点検につき不要です	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</li> <li>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。</li> </ul>		ご署名	印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)  
 岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6  
 TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者

1:定期交換部品 一式



2:コントロール基板、タッチパネル、排水ポンプ、ドレンバルブASSY



3:マニホールド電磁弁、配管パッキン



4:メインポンプ、酸素電磁弁、給水電磁弁、アルコールライン電磁弁

