

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

07-05392

No. 190924

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	森脇クリニック 様	機番	100582
環営	所在地	鳥取県倉吉市新町3-1081-4	納入日	2012年09月28日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	2019年08月01日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2019年09月17日

修理依頼・不具合内容

機械本体より水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

運転確認、水槽に3日間水張、分解点検しましたが、水漏れは再現しませんでした。

アッパーカバーと水槽の隙間を埋めるパッキンが劣化していましたので、ここから水が漏れたと推察して交換いたしました。

写真1：定期交換部品

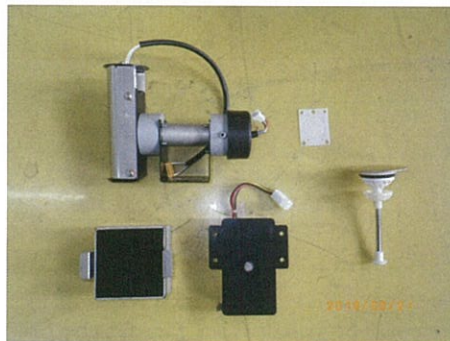


写真2：タッチパネル、配管チューブ、パッキン



[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.68 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：3 殺菌：648、殺菌+アルコール：1844、リークチェック：2
自己洗浄：1429、アルコール単独：3、エア単独：302

一以上一

承認
若 19.9.24 井
審査
中 19.9.24 澤
作成
R01.9.24 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品	1式	
	濃度計、センサー、フィルタ、排水栓、触媒		
2	配管パッキン	1式	アルコールタンクキャップ含む
3	タッチパネル	1台	

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528