

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和 2年 8月 4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100486
作業年月日	令和 2 年 8 月 4 日	作業時間： 1 Hr
顧客名	かわたに医院 様	TEL： 0859-35-8888
所在地	鳥取県米子市車尾南1-8-30	ご担当 様
販売店	宮野医療器株式会社 様	ご担当 勝部 様
納入年月日	平成 24 年 4 月 2 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2020年度OED1000S保守点検実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒	
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒	バルブ数 558
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒	履歴 072 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒	
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒	
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒	
		☐			☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常はみられませんでした。

装置情報	交換後運転回数： 202	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1098	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 252	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

令和2年 8月 4日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

未

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者

作業者

赤井

大河原