

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和 2年 10月 16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 301676
作業年月日	令和 2 年 10 月 16 日	作業時間： 1 Hr
顧客名	河本医院 様	TEL：
所在地	鳥取県倉吉市津原392番地2	ご担当 院長先生 様
販売店	ティーエスアルフレッサ株式会社 米子支店 様	ご担当 様
納入年月日	平成 29 年 5 月 10 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2020年度OED1000S保守点検実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 633
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常はマニホールド側です。

装置情報	交換後運転回数： 22276 更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 3433	殺菌/消毒+アル： 3433
	リークチェック： 349	自己洗浄： 342	アルコール単独： 0
			エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

令和2年 10月 16日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

鳥取県倉吉市津原392-2
医療法人 千希会 河本医院
医師 河本知香 印
電話 (0854) 23-5302

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者

作業者

赤井

大河原