

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 4 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300226
作業年月日	2020 年 4 月 2 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	胃腸科内科田中医院 様		TEL: 0852-66-0022
所在地	島根県松江市宍道町宍道 946-1		ご担当 様
販売店	テイエスエス(株) 松江支店 様		ご担当 増原 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
2020年度保守点検作業実施

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 486
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
特に異常はありませんでした。

装置情報	交換後運転回数: 187	更新(リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 10	殺菌/消毒+7L: 735
	リークチェック: 585	自己洗浄: 484	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィル		☒	1	排水フィルター		☒	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 4 月 2 日
島根県松江市宍道町宍道946番地1
胃腸科内科田中医院
田中新亮 印

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者	作業者
赤井	亀尾