

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 1 月 29 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500231
作業年月日	2021 年 1 月 29 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	公立邑智病院	様	TEL： 0855-95-2111
所在地	島根県邑智郡邑南町中野3848-2		ご担当 様
販売店	有限会社明石医科器械店		ご担当 明石 様
納入年月日	2019 年 3 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
2021年度 保守点検作業実施
その他、中視鏡トレイ持手破損により、新品無償交換。 小物入れ破損により、小物入れ代替品新品交換。小物入れ改良品試作品納品。

点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 1075
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
特に異常はありませんでした。 IHエレクトロニクス 中澤様より、本体フタパッキン交換。本体周り白色汚れ清掃済。

装置 情報	交換後運転回数： 1121 更新（リセット）実施・未実施	消毒（総運転回数）： 217 / 消毒（洗剤洗浄あり）： 0/0
	消毒＋アル（総運転回数）： 1605	/ 消毒＋アル（洗剤洗浄あり）： 1513
	リークチェック： 1619	自己洗浄： 375 アルコール単独： 6 エア単独： 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 52004180			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ；チューブ側	☒	水フィルター	☒
140306-001			オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
☐				☐		☐

お客様ご確認署名欄	2021 年 1 月 29 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	公立邑智病院
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
	