

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 6 月 3 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300008
作業年月日	2020 年 6 月 3 日		作業時間: 1, 5 Hr
顧客名	社会医療法人昌林会 安来第一病院 様		TEL: 0859-29-1170
所在地	島根県安来市安来町 899-1		ご担当 様
販売店	有限会社 明石医科器械店 様		ご担当 児玉 様
納入年月日	平成 24 年 12 月 18 日	保証期間 内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
2020年度 保守点検実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 558
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.62 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 □	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
□		□	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に異常はありませんでした。			

装置 情報	交換後運転回数: 112	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施	殺菌/消毒: 1860	殺菌/消毒+7L: 488
	リークチェック: 112	自己洗浄: 294	アルコール単独: 6	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			□	
オゾンセンサー		☒	1			□	

お客様ご確認署名欄	2020 年 6 月 3 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 三澤 秀元	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者	作業者
	