

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：	100421	
作業年月日	令和 3 年 2 月 3 日		作業時間：	/ / Hr	
顧客名	法勝寺内科クリニック 様		TEL：	0859-66-5858	
所在地	鳥取県西伯郡南部町法勝寺286-4		ご担当	院長先生 様	
販売店	新鋭工業(株)山陰支店 様		ご担当	大河原 様	
納入年月日	平成 24 年 4 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2021年度保守点検実施

不具合原因、作業内容

2021年度OED-1000保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 582
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 075 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

HL-割れ有り、使用中に破断発生。
その他異常はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数：	443	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：	1286	殺菌/消毒+AL：	2233
	リークチェック：	1252	自己洗浄：	1520	アルコール単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

令和3 年 2 月 3 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

三上真顯

印

修理業者	新鋭工業 株式会社 山陰支店 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 TEL：0859-34-5675	責任技術者	作業者
		赤井	大河原