

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021年 3月 30日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300007
作業年月日	2021 年 3 月 30 日		作業時間: 1, 5 Hr
顧客名	町立奥出雲病院 様		TEL: 0854-54-1122
所在地	島根県仁多郡奥出雲町三成1622-1		ご担当 様
販売店	有限会社 明石医科器械店 様		ご担当 明石 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2021年 保守点検作業実施

2021年3月オゾン水流量低下異常点検により、該当部品交換作業

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 778
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

点検した結果、特に異常はありませんでした。

装置情報	交換後運転回数: 239	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒: 418	殺菌/消毒+7L: 202
	リークチェック: 212	自己洗浄: 132	アルコール単独: 3	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 3 月 30 日

島根県仁多郡奥出雲町三成1622番地1

ご署名 町立奥出雲病院 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者 作業者

印