

# 修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号	07-05862	No. 21422
--------	----------	-----------

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	安来第一病院 様	機番	300008
環営	所在地	島根県安来市安来町 899-1	納入日	2012年12月18日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	2021年02月17日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2021年04月06日

## 修理依頼・不具合内容

電源が入らない。

## 不具合原因（故障箇所）と処置


### [1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

直流電源が故障していました。この故障がタッチパネル、コントロール基板へ波及していたので交換し、定期交換部品を交換いたしました。

写真1：定期交換部品

写真2：直流電源

写真3：タッチパネル、基板

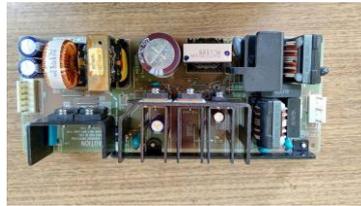

### [2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 $0.7 \pm 0.2$  ppm）：0.70 ppm・正常
- 3：出荷時の装置情報

消毒：1905、消毒+アルコール：534、リークチェック：157

自己洗浄：314、アルコール単独：7、エア単独：2

承認

松  
21.04.23  
永

責任技術者

中  
21.04.22  
澤

作成

R03.4.22

中澤

## 交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品 オゾン水濃度計、オゾンセンサ、フィルタ、触媒、排水栓 マニホールドホース	1式	濃度計 No. 51912379 パネル：740
2	直流電源	1台	
3	タッチパネル、コントロール基板	1台	Ver0209/T05C LED3.3V
4	アルコールタンクキャップ	1個	

(株) IHI アグリテック (旧社名 IHIシバウ)

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1