

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 6 月 15 日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                       | 製造番号: 300226      |
| 作業年月日 | 2021 年 6 月 15 日                                                                                                           |                                                                       | 作業時間: 1,5 Hr      |
| 顧客名   | 田中医院 様                                                                                                                    |                                                                       | TEL: 0852-66-0022 |
| 所在地   | 島根県松江市宍道町宍道946-1                                                                                                          |                                                                       | ご担当 園山 様          |
| 販売店   | ティーエスアルフレッサ(株)松江支店 様                                                                                                      |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 平成 26 年 3 月 12 日                                                                                                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                   |

## 不具合状況、依頼内容、異常履歴

使用スロ-70: GIF-XP260NS, GIF-Q260, PCF-Q260AI  
CV-290, CLV-290

## 不具合原因、作業内容

2021年 保守点検作業実施

## 点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 399    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.50 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                           |              | <input type="checkbox"/>                           |

## 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありません。(f=0)

|      |              |                |            |               |
|------|--------------|----------------|------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 168 | 更新(リセット)実施・未実施 | 殺菌/消毒: 10  | 殺菌/消毒+7L: 903 |
|      | リークチェック: 413 | 自己洗浄: 636      | アルコール単独: 2 | エア単独: 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: 水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |

## お客様ご確認署名欄

2021 年 6 月 15 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 胃腸科内科田中医院 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店  
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27  
TEL: 0859-34-5675

責任技術者 作業者

