

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日： 令和 3年 4月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：	300248
作業年月日	令和 3 年 4 月 26 日		作業時間：	15 Hr
顧客名	医療法人社団吉祥会 吉岡医院 様		TEL：	0852-76-3866
所在地	島根県松江市八束町波入607-1		ご担当	NAJ 様
販売店	新鋭工業株式会社 山陰支店 様		ご担当	大河原 様
納入年月日	平成 26 年 5 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
令和3年 保守点検実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 529
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 070 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☐ 破損あり	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
トレーの破損あり			

装置 情報	交換後運転回数：	78	更新（別外）実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：	21	殺菌/消毒+7L：	638
	リークチェック：	0	自己洗浄：	623	7Lアルコール単独：	1	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	令和3 年 4 月 26 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	吉岡志津枝 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 山陰支店 鳥取県米子市皆生温泉2-20-27 TEL：0859-34-5675	責任技術者	赤井	作業者	大河原
------	---	-------	----	-----	-----