

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 8 月 19 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500351
作業年月日	2021 年 8 月 19 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	医療法人真誠会 真誠会セントラルクリニック 様		TEL： 0859-29-0099
所在地	鳥取県米子市河崎580		ご担当 福島 様
販売店	新鋭工業株式会社山陰支店		ご担当 亀尾 様
納入年月日	2019 年 7 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2021年度 2回目保守点検作業実施 ご注文時2回目までのサービスの為今回まで無償対応。

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 970
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.78 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. /

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありません。(120)

装置 情報	交換後運転回数： 945 更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	消毒（総運転回数）： 999	消毒（洗剤洗浄あり）： 997
	消毒+アル（総運転回数）： 128	消毒+アル（洗剤洗浄あり）： 125	
	リークチェック： 0	自己洗浄： 331	7Lコル単独： 29

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ；チューブ側	☒	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

2021 年 8 月 19 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 真誠会セントラルクリニック

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
	