

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210903
発行日： 2021 年 9 月 3 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機	OED-1000	☐	Ver. 3.1	製造番号	301399
	オゾン水内視鏡消毒機	OED-1000S	☒	Ver. 3.1	作業年月日	2021 年 8 月 3 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機	OED-1000S Plus	☐	Ver. 1.0	作業時間	Hr
顧客名	山本外科内科医院 様				TEL :	0857-23-2064
所在地	鳥取県鳥取市末広温泉町125-2				ご担当	様
販売店					ご担当	様
納入年月日	2018 年 1 月 24 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒		

依頼内容	
ヒーター異常 (E:105)	
作業内容	
ヒータの故障ではなく、ヒーターからの運転信号をコントロール基板が受け付けられない状態でした。プログラムのバージョンアップを兼ねて基板ごと交換して復旧しました。	
点検項目	
フタロック	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒
トレイ	正常 ☐
水槽側コネクタ	正常 ☐
水槽 LED	正常 ☒
エアライン	正常 ☒
オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 787
排水栓、排水ライン	正常 ☒
細管送水ライン	正常 ☒
排気ライン	正常 ☒
オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
異常音、振動	正常 ☒
電源コード	正常 ☐
殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☐
マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
運転プログラム バージョン	正常 ☒ Ver. 0209 / ToSC
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
交換した基板にファンが付属しています。通電中は常に動いていますのでもし動作音が気になるようでしたら、背面のスイッチを切ってください。	

装置情報	交換後運転回数： 6	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 732	殺菌/消毒+77： 731
	リークチェック： 731	自己洗浄： 554	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐		オゾン分解触媒	☐	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☐	コントロール基板	☒ 1 式
オゾンセンサー	☐		接続コネクタ；水槽側	☐		☐
	☐		接続コネクタ；チューブ側	☐		☐
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	工場作業のため 不要です
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 株式会社 IHI 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤	中澤