

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号	07-05809	No. 210908
--------	----------	------------

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	門脇内科胃腸科 様	機番	300523
環営	所在地	島根県松江市雑賀町 205	納入日	2015年03月13日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	2021年07月29日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2021年09月01日

修理依頼・不具合内容

給水異常が出る

※タッチパネル上の異常履歴は 4/7 9:07 消毒時給水異常 (E:202) が最新。

不具合原因 (故障箇所) と処置予定


[1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

条件を振って運転確認しましたが、異常は再現しませんでした。

給水異常が発生する要因は下記が考えられますが、代替機が問題無く動いていることから「1」を省きました。「2」は排水栓に釘状の物がありましたので取り除きました。「3」と「4」について部品交換を行いました。

- 1 : 客先の給水量が少ない、圧力が規定 (0.1~0.8 MPa) から外れている
- 2 : 排水栓の動作不良による水の流失
- 3 : 給水電磁弁の故障または性能低下
- 4 : 水槽の水を検知する電気系統の不具合

写真 : 交換部品一式

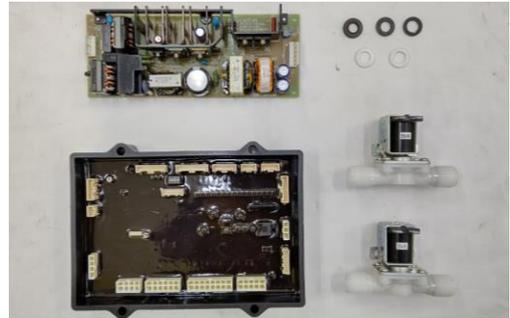

[2] 修理・点検内容

- 1 : 部品交換・・写真と下表をご参照ください
- 2 : オゾン水濃度測定 (規定値 0.7 ± 0.2 ppm) : 0.68 ppm・・正常
- 3 : 出荷時の装置情報

交換後運転回数 : 1140 殺菌 : 6789、殺菌+アルコール : 0、リ-クェック : 1
自己洗浄 : 1、アルコール単独 : 0、エア単独 : 0

承認	
審査	
作成	
R03.9.8	
中澤	

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	給水電磁弁	2個	
2	直流電源	1台	
3	コントロール基板	1枚	Ver. 0209 型