

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

07-05945

No. 211014

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 山陰支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	新田外科胃腸科病院 様		機番	301051
環営	所在地	鳥取県米子市中島 2-1-46		納入日	2016年11月30日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	2021年07月16日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	2021年09月08日

修理依頼・不具合内容

電源が付くが、動かない

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

タッチパネルが起動して「OED-1000S」から次の画面に進まないことを確認しました。分解点検したところ、コントロール基板の回路が故障しており、これが原因でタッチパネルからの電気信号を受け付けずに起動不良が発生しました。この部品を交換し、併せて保守点検を実施いたしました。

写真：交換部品



[2] 作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.67 ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：装置情報

交換後運転回数：400→0 消毒：1749、消毒+アルコール：271、リ-クェック：209
自己洗浄：55、アルコール単独：6、エア単独：0

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1枚	Ver. 0209/T05C
	定期交換部品 オゾン水濃度計、排水栓、脱気フィルタ、触媒、センサ	1式	濃度計 18073196 ハルズ 764

承認	松永
責任技術者	中澤
作成	中澤

(株) I H I 物流産業システム

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver.3.1