

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

07-05809

No. 210908

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿			機種	OED-1000S
客先	顧客名	門脇内科胃腸科 様			機番	300523
環営	所在地	島根県松江市雑賀町 205			納入日	2015 年 03 月 13 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2021 年 07 月 29 日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	2021 年 09 月 01 日
計	3					

修理依頼・不具合内容

給水異常が出る

※タッチパネル上の異常履歴は 4/7 9:07 消毒時給水異常 (E:202) が最新。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

条件を振って運転確認しましたが、異常は再現しませんでした。

給水異常が発生する要因は下記が考えられますが、代替機が問題無く動いていることから「1」を省きました。「2」は排水栓に釘状の物がありましたので取り除きました。「3」と「4」について部品交換を行いました。

- 1: 客先の給水量が少ない、圧力が規定 (0.1~0.8 MPa) から外れている
- 2: 排水栓の動作不良による水の流失
- 3: 給水電磁弁の故障または性能低下
- 4: 水槽の水を検知する電気系統の不具合

写真: 交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 1: 部品交換・写真と下表をご参照ください
- 2: オゾン水濃度測定 (規定値 0.7 ± 0.2 ppm): 0.68 ppm・正常
- 3: 出荷時の装置情報

交換後運転回数: 1140 殺菌: 6789、殺菌+アルコール: 0、リークチェック: 1

自己洗浄: 1、アルコール単独: 0、エア単独: 0

承認



審査



作成

R03.9.8

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	給水電磁弁	2 個	
2	直流電源	1 台	
3	コントロール基板	1 枚	Ver. 0209 型