

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号

No. 211021

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 山陰支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	のぐち内科クリニック 様		機番	300249
環営	所在地	鳥取県倉吉市上井町1丁目8-5		納入日	2014年05月29日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	2021年08月23日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	2021年10月20日

修理依頼・不具合内容


各部点検

不具合原因 (故障箇所) と処置

[1] 点検結果

故障の予防として電気系統の部品を中心に交換いたしました。

写真：交換部品一式

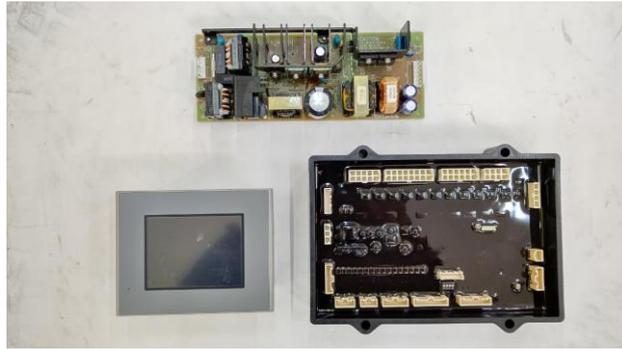

[2] 作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定 (規定値 0.7 ± 0.2 ppm)：0.70 ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：装置情報

交換後運転回数：51 消毒：1909、消毒+アルコール：2800、リ-クェック：0
自己洗浄：1712、アルコール単独：24、エア単独：1

承認
責任技術者
作成
R03. 10. 21
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1枚	Ver. 0209/T05C
	タッチパネル (カラー型)	1台	
	直流電源	1台	