

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 12 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号：
作業年月日	2021 年 12 月 2 日		作業時間： 10 Hr
顧客名	米子医療生協協同組合 おおたか診療所 様		TEL： 0859-27-9190
所在地	鳥取県米子市尾高2740-1		ご担当 様
販売店	新鋭工業株式会社 山陰支店		ご担当 大田 様
納入年月日	2020 年 11 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 704
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.77 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. /

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

2021年度保守点検実施完了。異常はみられず。

装置 情報	交換後運転回数： 207 / 774 更新（リセット）実施・未実施	消毒（総運転回数）： 53 / 消毒（洗剤洗浄あり）：	
	消毒+アル（総運転回数）： 178	/ 消毒+アル（洗剤洗浄あり）：	
	リークチェック： 1	自己洗浄： 1	アルコール単独： 1

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☒	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

おおたか診療所



修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者

作業者

