

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

07-05763

No. 210215

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿			機 種	O E D - 1 0 0 0 S
客先	1	顧 客 名	はしもとクリニック内科・呼吸器科 様			機 番	3 0 0 9 7 1
環営	1						
環品	1						
		所 在 地	鳥取県米子市大崎字荒神前 1 2 7 7 - 1			納 入 日	2016 年 09 月 26 日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	2020 年 12 月 14 日
計	3	返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	2021 年 02 月 12 日

修理依頼・不具合内容

タッチパネルのエラー表示が直らない

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

不具合を確認しました。（写真参照ください）
コントロール基板、電源基板、リレー基板の電気部品は異常がなく
タッチパネルの単独故障と判断して交換しました。

写真：タッチパネルエラー表示



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値0.7±0.2ppm）：0.72 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

タッチパネル故障のため、運転回数と呼び出せず、「0」にしています。

承認
松 21.02.15 永
責任技術者
中 21.02.15 澤
作成
R03.2.15 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	タッチパネル	1	