

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 5 月 28 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500492
作業年月日	2021 年 5 月 28 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	泉胃腸科医院	様	TEL： 0852-27-4976
所在地	島根県松江市黒田町94-9		ご担当 山根 様
販売店	新鋭工業株式会社山陰支店		ご担当 亀尾 様
納入年月日	2020 年 5 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2021年度 保守点検作業実施 (初回のみ無償)

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 8/2
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 1

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 1170 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数)： 1686 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 0
	消毒+アル (総運転回数)： 128	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 0
	リークチェック： 1195	自己洗浄： 23 アルコール単独： 30 エア単独： 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 5811003			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ；チューブ側	☒	水フィルター	☒
02802-006			オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
121	☐			☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 5 月 28 日

松江市黒田町94-9

医療法人 社団 泉胃腸科医院

ご署名 泉 大 輔 印

電話 (0852) 27-4976

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者 作業者

