

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 6 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500314
作業年月日	2021 年 6 月 11 日		作業時間	1.5 Hr
顧客名	黒田医院 様		TEL	0856-22-0966
所在地	島根県益田市須子町10-27		ご担当	様
販売店	新鋭工業株式会社カワニシ 益田営業所		ご担当	亀尾 様
納入年月日	2019 年 5 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

使用して不具合発生 EG-6600R EG-530N

不具合原因、作業内容

2021年度 保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 1688
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.43 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. /

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 449 更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	消毒（総運転回数）： 451 / 消毒（洗剤洗浄あり）： 449
	消毒+アル（総運転回数）： 0	/ 消毒+アル（洗剤洗浄あり）： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 99

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 5200/09			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☒	水フィルター	☒
16115-001			オゾン水濃度計用フィルタ	☒		☐
	☐			☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 11 日

医療法人 黒田 医院

ご署名 理事長 黒田 敬 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL : 0859-34-5675

責任技術者 作業者

