

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2021 年 3 月 2 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. 3.1	製造番号 100281
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2021年 3 月 2 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	丸山内科クリニック 様	TEL: 0855-22-1115
所在地	島根県 浜田市 相生町 3921	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2012 年 4 月 5 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張 引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

「リフチェック」で給水が止まらない。「消毒」は正常終了する
3/18 直後現象が起きたり、なかったりする。

不具合原因、作業内容

不具合現象を1度だけ確認しました。給水で止めるセンサーの検知感度が
若干鈍かったため交換しました。

点検項目

フタロック	正常 ☐	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ ボンパ 6.4MPa	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パル数 489
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☒ H 交換 H ₂ ~CN2~基板 OK	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☐
水槽側コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0209 / TOSC

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

不具合、お気付きの点がありましたら販売店に連絡下さい。

装置 情報	交換後運転回数: 258	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 13855	殺菌/消毒+7L: 2151 /
	リークチェック: 5899	自己洗浄: 2462	アルコール単独: 3422	エア単独: 706

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☐		オゾン分解触媒	☐	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☐	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☐		接続コネクタ; 水槽側	☐	水フィルター	☐
水位センサー H	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☐		
			オゾン水濃度計用フィルタ	☐		

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 3 月 2 日
島根県 浜田市 相生町 3921

丸山内科クリニック

ご署名

丸山 茂 雄

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

令和 3.3.2

中澤

中澤