

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 6 月 4 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 500697
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 6 月 4 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	花田医院 様	TEL: 0855-55-0005
所在地	島根県江津市後地町 3023	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2021 年 3 月 30 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

小物洗浄時オゾン水生成注意、オゾン水生成異常 頻発。
 内視鏡で消毒する時は正常終了する。

不具合原因、作業内容

小物 (コップ、送水ボトル、フェイスシート等) を洗う場合、「アイスウォッシュ」で
 洗って、洗剤が残ったまま、異常の原因になります。

点検項目

フタロック	正常 ☐	水槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 1164
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐ オゾン分解触媒交換
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐ 0.72
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐ 0.73
トレー	正常 ☐	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☐ 0.72
水槽側コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
		運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303 / 12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

オゾン水生成システムは問題ありませんでした。4回運転

装置 情報	交換後運転回数: 57	更新 (リセット) 実施: ☒ 未実施	殺菌/消毒: 20 / 19	殺菌/消毒+アル: 37 / 29
	リークチェック: 1	自己洗浄: 8	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☐		オゾン分解触媒	☒	1	吸盤	☐	
交換後 No.			排水栓	☐		エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☐		接続コネクタ; 水槽側	☐		水フィルター	☐	
			接続コネクタ; チューブ側	☐				
			オゾン水濃度計用フィルタ	☐				

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 4 日

ご署名 花田 印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
 岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
 TEL: 086-944-6528

責任技術者 作業者

2011.6.4

中沢

中沢