

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行: 令和3年8月20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300249
作業年月日	令和3年8月20日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	のぐち内科クリニック 様		TEL: 0858-24-6101
所在地	鳥取県倉吉市上井町1丁目8-5		ご担当 院長先生 様
販売店	新鋭工業(株) 山陰支店		ご担当 赤井 様
納入年月日	平成 26年5月29日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 545
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置情報	交換後運転回数: 938	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: 1890	殺菌/消毒+アル: 2768
	リークチェック: 0	自己洗浄: 1695	アルコール単独: 24	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	1
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	1
ポン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	令和3年 8 月 20 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	のぐち内科クリニック
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者	作業者
	赤井