

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

07-05882

No. 210614

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 山陰支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	つだ胃腸科内科クリニック 様	機番	300629
環営	所在地	島根県松江市西津田3丁目5番21号	納入日	2015年08月18日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	2021年04月20日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2021年06月1日

修理依頼・不具合内容

4/17 水温高異常（E:206）※が12回発生した

※機械に供給される水温が50度の場合に基板が異常と判断します。

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

「水温高異常」は再現しました。コントロール基板の回路が故障しており水温センサーからの信号を受け付けない状態でした。

水温センサー側に問題は無く、コントロール基板を交換して復旧いたしました。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：375 消毒：2334、消毒＋アルコール：2367、リークチェック：0

自己洗浄：1213、アルコール単独：18、エア単独：0

承認
松永
21.06.15
責任技術者
中澤
21.06.14
作成
R03.6.14
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	コントロール基板	1台	Ver0209/T05C