

保守点検・修理 報告書

発行日： 令和 3年 8月 10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 301225
作業年月日	令和 3 年 8 月 10 日	作業時間： 1 Hr
顧客名	潮医院 様	TEL： 0859-64-2028
所在地	鳥取県西伯郡南部町天万1534番地1	ご担当 様
販売店	有限会社内田医療器 様	ご担当 内田社長 様
納入年月日	平成 26 年 7 月 19 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
2021年度OED-1000S保守点検実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 546
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常は発生しませんでした。			

装置 情報	交換後運転回数： 198	更新（別件）実施・未実施	殺菌/消毒： 706	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 9	7Lコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	令和3年 8月 10日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	鳥取県西伯郡南部町天万1534番地1
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	医療法人社団 潮 医 院
	ご署名 理事長 潮 晴 美

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL：0859-34-5675

責任技術者	作業者
赤井	大河原