

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210929
発行日: 2021 年 9 月 29 日

販売名 / サビ・スミ・アール Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.1	製造番号 300922
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒ Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 9 月 29 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 Hr
顧客名	田中医院 様	TEL: 0857-27-0121
所在地	鳥取県鳥取市浜坂2-9-15	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	2016 年 7 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
9/28 濃度計のウォーミングアップが終わらず、運転できない。 オゾンセンサー故障 (E100) 光量低下異常 (E210) ユニット内異常 (E212)	
不具合原因、作業内容	
コントロール基板の回路が故障して濃度計からの信号を受付けられませんでした。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☐	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 639
オゾンセンサー 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☐
給水ライン 正常 ☐	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☐
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☐	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒ 2P 変換
トレイ 正常 ☐	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☐
水槽側コネクタ 正常 ☐	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0209 / TOSC
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項	
コントロール基板、濃度計を交換して復旧しました。	

装置情報	交換後運転回数: 44	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 2 /	殺菌/消毒+7L: 320 /
	リークチェック: 0	自己洗浄: 33	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☐	吸盤	☐
交換後 No. 17022671			排水栓	☐	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☐		接続コネクタ; 水槽側	☐	水フィルター	☐
コントロール基板	☒		接続コネクタ; チューブ側	☐		☐
			オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐

お客様ご確認署名欄	2021 年 9 月 29 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 田中 印

修理業者 株式会社 IHI 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
中澤	中澤