

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:

2021年9月16日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500057
作業年月日	2021年9月16日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	鳥取北クリニック 様		TEL:
所在地	鳥取県鳥取市賀露町4012		ご担当 様
販売店	宮野医療器(株)鳥取営業所		ご担当 吉村 様
納入年月日	2018年11月29日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 712
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303/T12A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 495	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	消毒 (総運転回数): 548	消毒 (洗剤洗浄あり): 1/520
	消毒+アル (総運転回数): 605		消毒+アル (洗剤洗浄あり): 1/280	1/570
	リークチェック: 0	自己洗浄: 583	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No.			排水栓	☒	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ側	☒	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィル	☒		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

3 年 9 月 16 日

ご署名 小谷 由香 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者 作業者

赤井