

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 10 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100275
作業年月日	2021 年 10 月 26 日		作業時間: 1, 5 Hr
顧客名	大田市国民健康保険 仁摩診療所 様		TEL: 0854-88-9030
所在地	島根県大田市仁摩町仁万 6 4 3 - 1		ご担当 様
販売店	株式会社エバルス 出雲支店 様		ご担当 浅津 様
納入年月日	平成 23 年 7 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2021年度 保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 443
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。納入から10年が経過しております。
更新の検討をお願い致します。

装置 情報	交換後運転回数: 115	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒: 1823	殺菌/消毒+7L: 0
	リークチェック: 4	自己洗浄: 11	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
カボン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	1
カボン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	1
カボン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 26 日

大田市仁摩町仁万643-1

大田市国民健康保険

仁摩診療所

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者

作業者

