

保守点検・修理 報告書

発行日: 2021 年 11 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100760
作業年月日	2021 年 11 月 9 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	中島医院 様		TEL: 0853-53-2116
所在地	島根県出雲市大社町杵築南991		ご担当 様
販売店	(株)サンキ 出雲支店 様		ご担当 錦織 様
納入年月日	平成 25 年 4 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

2021年度 保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 689
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 6.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	
	☐	タフパネIV	☐	タフパネIV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

タフパネIV部液晶の劣化が見られます。交換を推奨致します。

装置 情報	交換後運転回数: 820	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌/消毒: 1702	殺菌/消毒+アル: 1015
	リークチェック: 0	自己洗浄: 2	アルコール単独: 8	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ: 水槽側		☒	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ: チューブ側		☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

2021 年 11 月 9 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

中島医院



修理業者 新鋭工業 株式会社 山陰支店
鳥取県米子市皆生温泉2-20-27
TEL: 0859-34-5675

責任技術者

作業者

