

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 17529

納入先	新鋭工業（株）山陰支店 殿			機種	ONW-10B
所在地	鳥取県鳥取市吉成 2-14-33			機番	001742
ユーザー名	宮崎内科医院 様			納入日	
点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成 29 年 4 月 19 日
返送先	納入先と同じ			発送日	平成 29 年 5 月 22 日

修理依頼・異常内容

水槽の底から水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

機械を点検したところ、洗浄槽底部後面側に亀裂を確認しました。
何らかの衝撃が加わって底部が割れたと推測します。
水槽全体を交換して復旧しました。（写真をご参照ください）

写真 1：洗浄水槽 亀裂部分

No1～4：水槽、水位センサ

No5～9：ポンプ、電磁弁



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換（下表と写真をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.42～0.59 mg/L・・・正常
- 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。
- 運転回数：3808

—以上—

承認



審査



作成

H29. 5. 29
中澤

交換部品

No	部品名称	数量	備考
1	洗浄水槽	1 台	
2	配管チューブ・パッキン	1 式	
3	オゾン分解触媒	1 個	
4	水位レベルセンサ	3 本	
5～7	水ポンプ	3 台	P-1, P-2, P-3
8	給水電磁弁	2 個	
9	排水バルブ（駆動用抵抗含む）	1 式	