

日付: H20 6 / 20 作業者 若井 (SM)

ONW-10機番: 000875

PSA機番: SPS- 0761

客先: 田田病院

様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否	☒ 否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	☒ 否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	☒ 否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	☒ 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	☒ 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否	☒ 否
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否	☒ 否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上) (91.5 %)	合/否	☒ 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.80 L/min)	合/否	☒ 否
PSA圧力の確認 (102 Mpa) ~ (178 Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合/否	☒ 否
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	☒ 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	☒ 否
ドレンチューブは接続したか	合/否	☒ 否
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合/否	☒ 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	☒ 否 ※ 取り付け
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否	☒ 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	☒ 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	☒ 否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	☒ 否
確認試験		
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上) 紙インジケータで合格	合/否	☒ 否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	☒ 否
インジケータの変色は良好か	合/否	☒ 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

・プログラム変更 8 → 10

・カビ無し

・オゾンセンサー 日セラ製(白シール)

・コネクタ- 4 パッキン, Oリング無し. 取り付けた.