

# 修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

No. 110701

|       |    |   |       |                  |      |       |            |
|-------|----|---|-------|------------------|------|-------|------------|
| 配 布 先 | 客先 | 1 | 納入先   | 新鋭工業株式会社 仙台支店 殿  |      | 機 種   | ONW-10     |
| 環 営   | 1  |   | 所 在 地 | 宮城県仙台市若林区荒井字初田30 |      | 機 番   | 001117     |
|       |    |   | ユーザ名  | 七郷クリニック 様        |      | 納 入 日 | 平成19年1月15日 |
|       |    |   | 点 検 者 | 中澤一裕             | 作業時間 | 受 付 日 | 平成23年5月23日 |
| 計     | 2  |   | 返 送 先 | 納入先と同じ           |      | 出 荷 日 | 平成23年6月30日 |

## 修理依頼・苦情内容

スタート後にブレーカが落ちる（切れる）。

## 不具合原因（故障箇所）と処置予定

### 〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

異常は再現しませんでした。水ポンプの電線コネクタ部分に水が掛かった跡がありここから漏電して機械背面にある漏電ブレーカが切れたものと思われます。

水ポンプコネクタを交換後、防水対策を実施して復旧しました。

写真1：水ポンプコネクタ

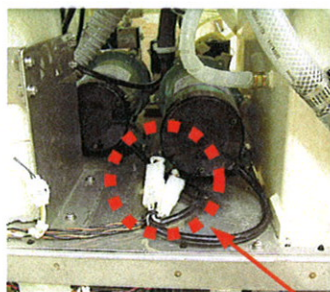


写真2：コネクタ拡大


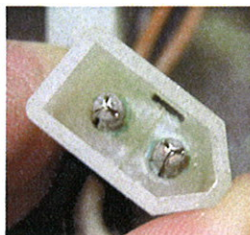


写真3：防水対策後

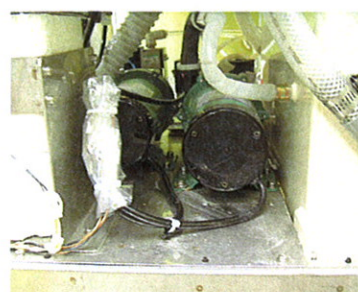

コネクタを起こして撮影

### 〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.42～0.56 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・部品の交換時期が近づいています。  
酸素濃度：93.7% 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.105～0.177 MPa（AC100V、50Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常
- 総運転回数：2967回

—以上—

承認

江  
23.7.1  
口

審査

江  
23.7.1  
口

作成

H23.7.1

中澤

## 推奨 交換 部品

| 部品番号 | 部品名称          | 数量 | 備 考 |
|------|---------------|----|-----|
|      | 水ポンプ（P-2）コネクタ | 1  |     |
|      | フタパッキン        | 1  |     |
|      |               |    |     |
|      |               |    |     |