

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日 平成 28 年 9 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100041
作業年月日	平成 <u>28</u> 年 <u>9</u> 月 <u>8</u> 日		作業時間:	<u> </u> Hr
顧客名	<u>ワレリヤ 株式会社</u>		TEL:	<u>018-699-1122</u>
所在地	<u>岩手県滝沢村滝沢字工沢541</u>		担当	<u>様</u>
販売店	<u>林) 南部屋理科</u>		担当	<u>鹿又 様</u>
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒		
<u>出張</u> ・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
<u>H28 8/9 水位低下異常</u>			
不具合原因、作業内容			
<u>保守点検作業実施</u>			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数 <u>800</u>
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 <u>0.70 ppm</u>
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
<u>異常の解消を確認。</u>			

装置情報	交換後運転回数:	<u>324</u>	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌:	<u>7</u>	殺菌+7L:	<u>317</u>
	リークチェック:	<u>29</u>	自己洗浄:	<u>76</u>	7L単独:	<u>0</u>	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾンセンサ Assy	762301223	☒	1			☐	
排水栓 Assy	762200560	☒	1			☐	
オゾン水濃度計	762302010	☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
分解洗浄剤		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	