

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 110801

配布先	客先	納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店 殿	機種	ONW-10
環境	1	所在地	山形県酒田市錦町 5-32-698	機番	000455
		ユーザー名	いくま内科胃腸科クリニック 様	納入日	平成 16 年 8 月 24 日
		点検者	中澤一裕	作業時間	
				受付日	平成 23 年 6 月 15 日
計	2	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 23 年 7 月 29 日

修理依頼・苦情内容

- ・エラー 8（オゾンガス漏れ）オゾン排出口にゼリー状詰まり。
まれにポンプより異音

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・エラー 8 につきまして
ゼリー状の詰まりは確認できず、エラー 8 も再現しませんでした。
おそらく輸送～点検までにゼリー状の物質中の水分が蒸発して体積が減少したと思われます。
オゾン排出系統のダクトホースを分解清掃と定期点検を実施しました。
- ・異音につきまして
総運転回数 3653 回から判断して
水ポンプの交換時期が近づいています。
今後異音が頻発するようでしたら
交換を推奨いたします。



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.47～0.56 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：94.5% 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.085～0.154 MPa（AC100V、50Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認

江
23.8.-1
口

審査

江
23.8.-1
口

作成

H23.8.1

中澤

推奨 交換 部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	吸着筒、吸湿筒	1 式	SPS-10110⇒SPS-10504
	ドレンフィルター	1 個	
	オゾン分解触媒	1 個	
	オゾンセンサ（日セラ製）	1 個	調査のため無償交換