

保守点検・修理 報告書

管理 No. 10

発行日 平成 24年 4月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100157
作業年月日	平成 24年 4月 19日		作業時間: / Hr
顧客名	さいわい町ファミリークリニック 様		TEL: 022-781-9815
所在地	仙台市宮城野区幸町2-21-8		担当 赤羽院長 様
販売店	丸木医科器械株式会社		担当 小平 様
納入年月日	平成 23年 3月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒
<u>出張</u> ・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

H23.10 給水トラブル - 設置 (濃度計の異常、オゾン水生成異常あり)

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 78/
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

無問題で終了。給水トラブル - H23.10 設置 経過観察中
脱気フィルター - H23.10 交換 経過観察中

装置情報	交換後運転回数: 121	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 6	殺菌+7L: 112
	リークチェック: 9	自己洗浄: 113	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/			☐	
排水栓		☒	/			☐	
オゾン濃度計		☒	/			☐	
脱気フィルター		☐	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

赤羽

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店

宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F

TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

大友

後藤