

保守点検・修理 報告書

管理 No. 11

発行日 平成24年6月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100043
作業年月日	平成 24年 6月 28日		作業時間: / Hr
顧客名	明日実病院 様		TEL: 0186-42-2305
所在地	秋田県大館市御成町3-2-3		担当 様
販売店	(株) いわや		担当 工藤 様
納入年月日	平成 22年 6月30日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ (2年) 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 440
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 1448	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 1440	殺菌+アル: 808
	リークチェック: 1084	自己洗浄: 203	アルコール単独: 31	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	PLV9-VXセッ?		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
吸盤(3個入)		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成24年 6月 28日

ご署名

奈良修 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店

宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス

TEL: 022-782-4661



責任技術者

作業者

