

保守点検・修理 報告書

管理 No. 18
発行日 平成 24年10月12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号 : 100042
作業年月日	平成 24年 10月 12日		作業時間 : / Hr
顧客名	消化器科・内科 井上クリニック		TEL : 023-681-6080
所在地	山形県山形市北町3-7-1		担当
販売店	岡崎医療株式会社		担当 栗田様
納入年月日	平成 22年 9月 8日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 2年 2回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
総合保守点検契約（定期保守点検パック実施）			
排水栓用金具・カム交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 478
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし。			
O ₂ ポンプ残圧のニリゆがみの為交換をおすすめ致します。			

装置 情報	交換後運転回数 : 1,593	更新(リセット)実施・未実施	殺菌 : 3,180	殺菌+7L : 0
	リークチェック : 3,188	自己洗浄 : 504	7L単独 : 0	エア単独 : 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	2
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
排水栓		☒	1	排水栓用金具		☒	1
脱気フィルター		☒	1	カム		☒	1
吸盤		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄		2012年 10月 12日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 渡辺 直子		印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL : 022-782-4661

責任技術者	作業者
	