

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年11月8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	100294
作業年月日	平成24年11月8日	作業時間	1 Hr
顧客名	田島クリニック 様	TEL	0176-23-5002
所在地	青森県八戸市稲井町23-30	担当	様
販売店	(株)加賀医療器	担当	杉沢 様
納入年月日	平成23年11月10日	保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合は、特に無し。
5/15 酸素圧力異常2 (E-200)
6/25 "
7/1 "

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 750
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 151	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 13	殺菌+アル: 139
	リークチェック: 0	自己洗浄: 106	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
脱気フィルタ		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年24.11.08 日

田島 浩 (印)

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

