

保守点検・修理 報告書

発行日 平成24年12月20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100133
作業年月日	平成 24年 12月 20日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	織内医院 様		TEL: 0246-44-1133
所在地	福島県いわき市常磐関船町迎16		担当 吉田 様
販売店	株式会社日東		担当 様
納入年月日	平成 22年 12月24日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 405
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 1141	更新（リセット） ☒ （実施）・未実施	殺菌: 926/1121	殺菌+7L: 926
	リークチェック: 300	自己洗浄: 467	7Lアルコール単独: 8	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	接続コネクタ		☒	2
オゾン濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
吸盤		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H24 年 12 月 20 日

吉田 賢

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-1 2 大和町レジデンス
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者

