

保守点検・修理 報告書

管理 No. 22

発行日 平成 24年 12月 3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100064
作業年月日	平成 24年 11月 29日	作業時間: 3 Hr
顧客名	むらまつくリニック 様	TEL: 019-635-5110
所在地		担当 村松院長 様
販売店	(株)南部医理科 本社	担当 鹿又 様
納入年月日	平成 22年 11月 19日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2年目の保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検部品 交換作業実施・排水栓金具の交換作業

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 673
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常無し

装置 情報	交換後運転回数: 363	更新 (リセット) <u>実施</u> 未実施	殺菌: 3	殺菌+7L: 360
	リークチェック: 0	自己洗浄: 194	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	水槽内コネクタ 2 個		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	排水栓金具		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
吸盤 3 個		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H24 年 12 月 4 日

ご署名 むらまつくリニック



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-1 2 大和町レジデンス 1 F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	H24.11.29 阿部