

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年3月12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100188
作業年月日	平成25年3月12日		作業時間: / Hr
顧客名	緑ヶ丘消化器内科医院		TEL:
所在地	盛岡市緑ヶ丘3-2-34		担当 様
販売店	株式会社 南部医理科		担当 鹿又 様
納入年月日	平成23年2月15日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2年目 保守点検

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パルス数 582
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 985	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌: 273	殺菌+アル: 1643
	リークチェック: 1915	自己洗浄: 599	アルコール単独: 11	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	1
オゾン濃度計Assy		☒	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25年 3月 12日

鈴木 昇
ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者	作業者
	H25.3/2