

保守点検・修理 報告書

管理 No. 34

発行日 平成25年5月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100499
作業年月日	平成 25年 5月17日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	小野病院 様		TEL: 0241-22-0414
所在地	福島県喜多方市字沼田6994		担当 様
販売店	株式会社アクトメディカルサービス		担当 様
納入年月日	平成 24年 5月16日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目		定期点検シール記入 ☒
☒ 出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴 5/24, 7/1, 7/1, 7/2 殺菌時給水異常

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒ 酸素残圧 0.5MPa	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 531
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 0	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌: 3	殺菌+7L: 131
	リークチェック: 83	自己洗浄: 105	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	給水フィルター		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
吸盤（3個入）		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H25年 5月 17日

ご署名 金本トシ子



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者



H25.5.17

