

OED-1000部品交換・点検報告書

お客様 一番町きじまクリニック 御中 製造番号 100362

住所 仙台市青葉区一番町三丁目6-1一番町平和ビル5F

点検者 新鋭工業(株)仙台支店 後藤 点検日:平成25年 6月 17日

◎作業前: 水道の蛇口(開閉) ポンベ元栓(開閉) キャスター(ON・OFF) 主電源(ON・OFF)

	チェック箇所	内容	チェック	備考
現状確認	タッチパネル装置情報	Ver.0107 / T01.A	☑	
	プログラム			
	納入年月日	12年 3月 26日		
	前回定期交換日	13年 5月 09日		
	交換後運転回数	()回		
	運転回数(殺菌)	A(5)回		
	運転回数(殺菌+アル)	B(30)回		
	運転回数(リークチェック)	(8)回		
	運転回数(自己洗浄)	(23)回		
	運転回数(アルコール単独)	(0)回		
作業・点検	運転回数(エア単独)	(0)回		
	コントロール基板交換	基板の固定 ネジ4箇所 コネクタ接続 12箇所	☑ ☑	
	シリコンチューブ点検	3000回以上 劣化の有無	☐	
	A+Bで3000回以上のみ確認	3000回以下	☑	
	アッパーパネル	ネジ4箇所 取り付け状態の確認	☑ ☑	
	サイドパネル	樹脂ワッシャ付ネジ5箇所 取り付け状態の確認	☑ ☑	
	リヤパネル	ネジ9箇所 取り付け状態の確認	☑ ☑	
	排水ホース	接続状態、取り回し、ホース折れの有無	☑	
	給水ホース	接続状態、取り回し、ホース折れの有無	☑	
	酸素配管	接続状態、取り回し、ホース折れの有無	☑	
	装置外觀検査	トレイ、排水栓、フタ、タッチパネル などに異常はないか	☑	
	バージョンアップ確認	Ver.0107/T01.A	☑	
	運転			
	殺菌運転を実施	異音・水漏れがなく正常終了したか	☑	
	殺菌履歴	平均オゾン水濃度(0.72)ppm	☑	

◎現状復帰 : 水道の蛇口(開閉) ポンベ元栓(開閉) キャスター(ON・OFF) 主電源(ON・OFF)

作業結果、連絡事項、特記事項

※オゾンセンサー交換

お客様ご確認署名欄
内容をよくご確認の上ご署名いただきますようお願いいたします。
本作業にて知れた個人情報他は他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 印