

OED-1000部品交換・点検報告書

お客様 ニチ 71ニヤ7 御中 製造番号 100 483
住所 岩手県ニ市石切所森有 32-1
点検者 早坂 点検日:平成25年 6 月 28 日

◎作業前: 水道の蛇口(開・閉) ボンベ元栓(開・閉) キャスター(ON・OFF) 主電源(ON・OFF)

	チェック箇所	内容	チェック	備考
現状確認	タッチパネル装置情報	Ver.010 <u>7</u> /T01.A	☒	
	プログラム			
	納入年月日	<u>2012</u> 年 <u>3</u> 月 <u>28</u> 日		
	前回定期交換日	<u>2013</u> 年 <u>5</u> 月 <u>14</u> 日		
	交換後運転回数	(<u>33</u>)回		
	運転回数(殺菌)	A(<u>282</u>)回		
	運転回数(殺菌+アル)	B(<u>0</u>)回		
	運転回数(リークチェック)	(<u>72</u>)回		
	運転回数(自己洗浄)	(<u>170</u>)回		
	運転回数(アルコール単独)	(<u>0</u>)回		
作業・点検	コントロール基板交換	基板の固定 ネジ4箇所 コネクタ接続 12箇所	☒ ☒	
	シリコンチューブ点検	3000回以上 劣化の有無	☐	
		A+Bで3000回以上のみ確認 3000回以下	☒	
	アッパーパネル	ネジ4箇所	☒	
		取り付け状態の確認	☒	
	サイドパネル	樹脂ワッシャ付ネジ5箇所	☒	
		取り付け状態の確認	☒	
	リヤパネル	ネジ9箇所	☒	
		取り付け状態の確認	☒	
	排水ホース	接続状態、取り回し、ホース折れの有無	☒	
	給水ホース	接続状態、取り回し、ホース折れの有無	☒	
	酸素配管	接続状態、取り回し、ホース折れの有無	☒	
	装置外観検査	トレー、排水栓、フタ、タッチパネル などに異常はないか	☒	
運転	バージョンアップ確認	Ver.0107/T01.A	☒	
	殺菌運転を実施	異音・水漏れがなく正常終了したか	☒	
	殺菌履歴	平均オゾン水濃度(<u>0.69</u>)ppm	☒	

◎現状復帰 :水道の蛇口(開・閉) ボンベ元栓(開・閉) キャスター(ON・OFF) 主電源(ON・OFF)

作業結果、連絡事項、特記事項	
お客様ご確認署名欄 内容をよくご確認の上ご署名いただきますようお願いいたします。 本作業にて知れた個人情報他は他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	ご署名 印