

OED-1000部品交換・点検報告書

お客様 会津西 HP 御中 製造番号 100441
住所 _____
点検者 大友・隆子 点検日:平成25年 6 月 3 日

◎作業前: 水道の蛇口(開・閉) ポンベ元栓(開・閉) キャスター(ON・OFF) 主電源(ON・OFF)

	チェック箇所	内容	チェック	備考
現状確認	タッチパネル装置情報		☒	
	プログラム	Ver.0107 / T01.A		
	納入年月日	12 年 3 月 16 日		
	前回定期交換日	12 年 12 月 27 日		
	交換後運転回数	(679)回		
	運転回数(殺菌)	A(1803)回		
	運転回数(殺菌+アル)	B(402)回		
	運転回数(リークチェック)	(2201)回		
	運転回数(自己洗浄)	(65)回		
	運転回数(アルコール単独)	(0)回		
作業・点検	運転回数(エア単独)	(30)回	☒	
	コントロール基板交換	基板の固定 ネジ4箇所 コネクタ接続 12箇所		
	シリコンチューブ点検	3000回以上 劣化の有無 A+Bで3000回以上のみ確認 3000回以下		
	アッパーパネル	ネジ4箇所 取り付け状態の確認		
	サイドパネル	樹脂ワッシャ付ネジ5箇所 取り付け状態の確認		
	リヤパネル	ネジ9箇所 取り付け状態の確認		
	排水ホース	接続状態、取り回し、ホース折れの有無		
	給水ホース	接続状態、取り回し、ホース折れの有無		
	酸素配管	接続状態、取り回し、ホース折れの有無		
	装置外観検査	トレー、排水栓、フタ、タッチパネル などに異常はないか		
	バージョンアップ確認	Ver.0107 / T01.A		
	運転			
	殺菌運転を実施	異音・水漏れがなく正常終了したか		
	殺菌履歴	平均オゾン水濃度(0.68)ppm		

◎現状復帰 :水道の蛇口(開・閉) ポンベ元栓(開・閉) キャスター(ON・OFF) 主電源(ON・OFF)

作業結果、連絡事項、特記事項

お客様ご確認署名欄
内容をよくご確認の上ご署名いただきますようお願いいたします。
本作業にて知れた個人情報は他の目的では使用いたしません。

年 月 日
ご署名 印