

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成25年 8月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号：100581
作業年月日	平成 25年 8月22日		作業時間： / Hr
顧客名	大友病院 様		TEL：
所在地	宮城県気仙沼市三日町2-2-25		担当 様
販売店	有限会社アベ医療器		担当 様
納入年月日	平成 24年 11月 20日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
8/10 IS-12. フロツク, 工程確認. リセット済 (工場の対応) *現在正常	
不具合原因、作業内容	
オゾンセンサー故障 → 排気ファン故障 → ISシステム異常 → フロツク異常 同時発生. フロツク Ver 0107へ変更	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 513
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
終了 1年ほど経. 正常状態 (無償)	

装置 情報	交換後運転回数：178	更新（リセット）実施・未実施	殺菌：138	殺菌+アル：99
	リークチェック：163	自己洗浄：25	アルコール単独：1	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店 宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F TEL：022-782-4661	責任技術者	作業者
		後藤